

PZN 6551988

■ **Blutzucker-Messsystem:
ProfiLine®**

Optimiert für professionelle Anwender:

- sicher:** Streifenauswurfaste
- UNI-Code:** keine Codierung notwendig
- Umschaltbar:** mg/dL (10 - 600) - mmol/L (0,6 - 33,3)
- konform:** RILIBÄK + ISO 15197:2013
- Hämatokrit-Bereich:** 0 - 70%
- GDH-Enzym** = sauerstoffunabhängig
- Optimiert** = großes beleuchtetes Display



PZN 6551994

■ **Blutzucker:
Messstreifen**

RILIBÄK



50 Stk./Packung

■ **Anwendung
der Einmal-
Lanzette:**

1. Schutzkappe abdrehen

2. Select fingertip insertion site slightly off centre to minimise any discomfort and maximise blood flow



Hold the lancet firmly against site and press the release button to activate the device.

2. Lanzette fest gegen Einstichstelle halten und zur Aktivierung des Geräts Auslöseknopf drücken

3. Dispose of safety lancet in a suitable safety container.



3. Sicherheitslanzette in einem geeigneten Sicherheitsbehälter entsorgen

4. Gently massage the finger in the direction of the puncture site to obtain the required volume of blood.



4. Zur Entnahme der erforderlichen Menge Blut Finger sanft in Richtung der Punktionsstelle massieren

PZN 11149372

■ **Lanzetten:
ProfiLine II**

TRBA250



100 Stk./Packung

PZN 6426562


■ **Pen-Nadeln:
Clickfine AutoProtect**

TRBA250




100 Stk./Packung


■ **So funktioniert die Einmal-Pen-Nadel:**

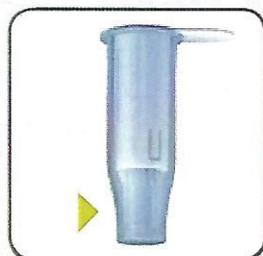

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ mit Schutzkappe

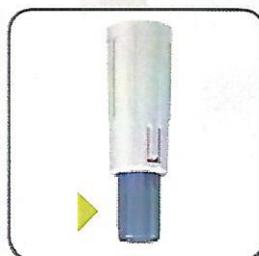

Vor der Injektion: Kanüle ist durch Schutzhülse geschützt

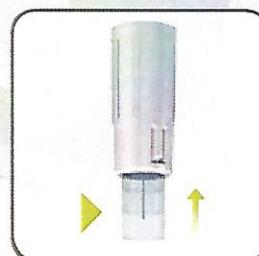

Während der Injektion: Schutzhülse gibt Nadel frei



Nach der Injektion: automatische Verriegelung; rote Verriegelungsanzeige wird sichtbar